


BRUKSANVISNING FÖR IS-/ KRONDUBB

Art.Nr.:33960000/33960010

Tradotim art.nummer: **GG-U-RF, GG-U-RF-KR**

ANVÄNDNINGENS ÄNDAMÅL:

Is-/ krongubbens uppgift är att förbättra säkerheten för användare av gånghjälpmedel,på isiga och snöiga underlag.

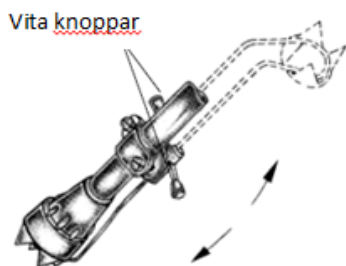

MONTERING:

1. Öppna dom båda fastsättningskruvarna och lösgör den yttre fastsättningsdelen.
2. Håll is-/krondubben med ena handen och tryck ihop dom båda vita knopparna.
3. Sväng nu ner delen med isdubben.
4. Nu kan du sätta is-/krondubbens stomdel på nedre delen av armbågskryckan eller på något annat gånghjälpmedel.Skruva fast den yttre fastsättningsdelen igen.Spänn inte ännu fast skruvarna helt.Observera att,svängmekanismen med isdubben inte får vara svängd mot benet när man går.
5. Montera is-/krondubbens jämna metalldel tätt mot underdelen av käppgummit. Spänn fast skruvarna ordentligt.
Vid behov ,begär hjälp med monteringen av försäljaren av produkten.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- På grund av användningsändamålet är isdubben mycket vass.Därför finns risk för stick-och skärskador.
- Följ monteringsanvisningarna.
- Kontrollera att svängmekanismen är ordentligt fastskruvad.
- Använd is-/krondubben endast på underlag med is eller snö och endast utomhus.
- Använd aldrig is-/krondubben på känsliga underlag.
- Använd isdubben med försiktighet,eftersom ovarsam användning kan orsaka stick-eller skärskador på utomstående.
- Montera bort isdubben om den inte mera används.

GARANTI:

Enligt lagstadgad garantirätt.Garantin gäller inte i följande fall: skador på grund av ovarsam användning,normalt slitage eller brister som har en marginell betydelse för produktens värde eller användning.