

SHG-GB50S-F

Användarmanual 1(2)

Säkerhetsbälte "oändlig", metall lås, 2000x50 mm

Läs instruktionerna innan ibruktagning av säkerhetsbältet.

PRODUKTENS ANVÄNDNINGSSYFTE

Denna produkt är till för att hålla personen på plats i rullstolen, på bår, i sängen, eller vid andra liknande tillfällen. Detta säkerhetsbälte är ei avsett för fordon drivna av förbränningsmotor.

RENGÖRNING

Rengörs med fuktig trasa.

För rengörning och desinficering får ej medel innehållande klor eller aktivt klor användas.

Använd ej tvålatten eller tvättmedel innehållande citrus.

SKADA PÅ PRODUKTEN


Om produkten skadas även delvis måste bältet bytas ut till en ny.

SÄKERHETSBÄLTETS LIVSLÄNGD


Produkten måste bytas ut till ett nytt säkerhetsbälte vart femte år även om det har använts och/eller rengjorts enligt beskrivning.

ANVÄNDING

1. Spänn fast säkerhetsbältet runt hela stolen.

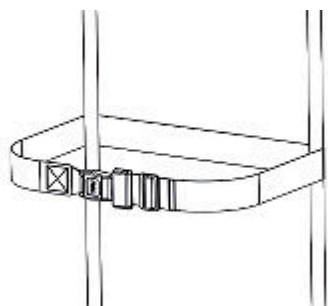

2. Öppnande och låsning av låset
Tryck på "Press" knappen för att öppna säkerhetsbältet.
För bältet in i låset och se till att det "klickar" på plats.

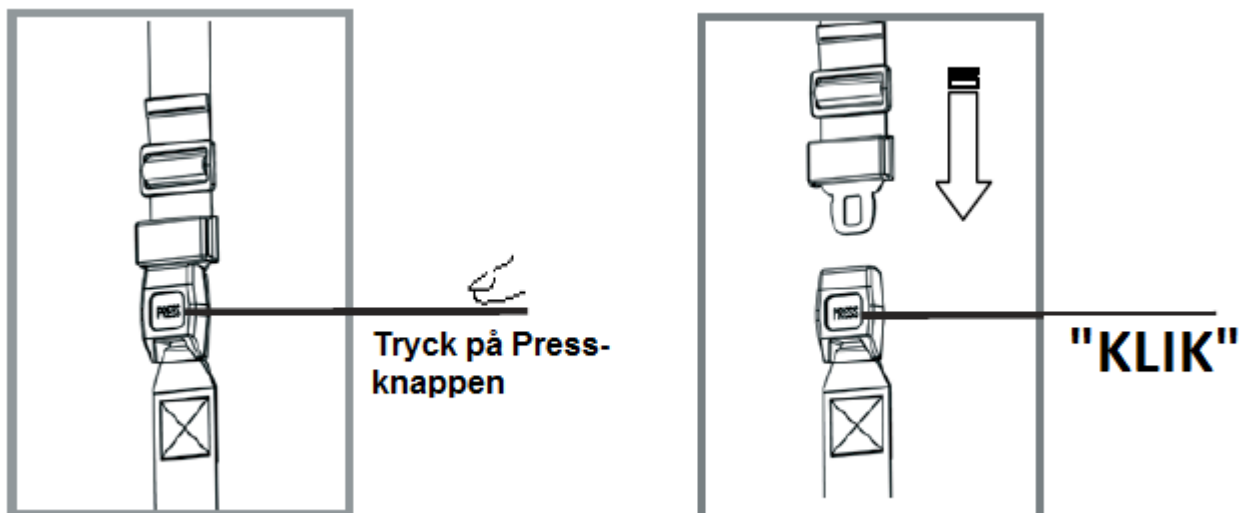

3. Säkerhetsbältet kan justeras steglöst när bältet är i 90 grader i förhållande med låset, se bild

